

**Appareil de
communication
CO-04**

SYSTEME MICROLINK-HANDYMIC



Référence	Système Microlink-HandyMic (émetteur-récepteur)
Fabricant	www.phonak.com

Description

Microlink permet aux malentendants de bien entendre et de comprendre dans des environnements bruyants. Ce système se compose de deux parties : le microphone émetteur HandyMic et un sabot audio avec radiorécepteur intégré. Le récepteur est tout simplement enclenché sur l'appareil auditif. Le HandyMic transmet sans fil la voix de la personne qui parle directement à l'aide auditive de l'utilisateur.

Fonctions

L'émetteur HandyMic comporte 3 positions :

- Grand angle : mode convenant pour les pièces calmes et pour de petites réunions (balayage de la totalité de l'environnement auditif)
- Zoom : mode convenant pour se concentrer sur 2 ou 3 personnes (supprime efficacement les bruits environnants)
- Super zoom : mode convenant pour les environnements très bruyants permettant de se concentrer sur un orateur dont seule la voix sera clairement transmise

Ce micro HandyMic peut-être mis autour du cou ou dans la main.

Caractéristiques techniques

- Pour utilisation TV : utiliser un cordon péritel ou Jack.
- Connexion également possible avec téléphone et radio
- Pour une utilisation normale : mettre en charge chaque jour l'émetteur.

Remarques

L'utilisateur devra se munir d'un sabot qui s'enclenche directement sur l'aide auditive